

類別：機械器具 5 4 医療用捲綿子
一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子（JMDNコード：1 0 1 7 2 0 0 0）

植毛綿棒 鼻腔用

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な所に保管すること。

有効期間：滅菌日より3年〔自己認証（弊社データ）による〕

【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を取り付けたものである。

【材質】

- ・綿体：ナイロン
- ・軸：ナイロン

【寸法】

- ・全長：約 156 mm
- ・綿体長：約 17 mm
- ・綿体径：約 3mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディック株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

【使用目的又は効果】

各種検査の検体採取に使用する。

主に鼻腔、鼻咽頭の検体採取用に適しています。

【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分で検体を採取する。

【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 常温下で使用し、凍結や加熱をしないでください。
- 3) 綿棒の軸を折らないようご注意ください。
小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 4) 検体を直接採取する時、採取する粘膜等の部位を傷つけないよう注意してください。
- 5) 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。
- 6) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。
- 7) 使用後は速やかに滅菌処理等を行ってから廃棄してください。